


TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ทีโอพี เมดิคอล จำกัด

188 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

 TOPMEDICAL.TH@GMAIL.COM

 053-711965 , 064-0974083

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Mind Mask

คุณลักษณะพิเศษ

1. ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ซ้อนกัน 3 ชั้น จับจีบ 3 จีบ ใช้ระบบคลื่นความร้อนจากเครื่องอัลตราโซนิค ขี้จีบ ตะเข็บผ้า และยางยืดให้ติดกัน เมื่อเกิดการเสียดสี จะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
2. เมื่อคือน้หน้ากากออกเป็นรูปครึ่งวงกลม เวลาสวมใส่ หน้ากากสามารถครอบจมูกและปาก ปิดคลุมกว้างได้ถึงปลายคาง
3. ยางยืด เป็นชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นพิเศษ และไม่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
4. สวมใส่แล้ว หายใจสะดวก สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย สอดคล้องกับ New Normal


คุณสมบัติ และการป้องกัน

1. สามารถต้านทานละอองน้ำ ของเหลว จากการไอ หรือจาม
2. ไม่มีไฟฟ้าสถิต
3. มีผิวสัมผัสนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
4. ปกป้องเชื้อแบคทีเรีย >98% และละอองฝุ่น PM 2.5 > 95% (สูงสุดถึง 0.3 ไมครอน)
5. ได้รับการรับรองผลของการกรองเชื้อแบคทีเรีย จากสถาบันการตรวจสอบ THTI สถาบันพัฒนาสิ่งทอ (ประเทศไทย)



TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ทีโอพี เมดิคอล จำกัด



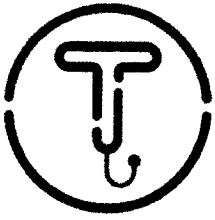

TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ท็อป เมดิคอล จำกัด

188 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

TOPMEDICAL.TH@GMAIL.COM

053-711965 , 064-0974083


วิธีสวมใส่

1. ก่อนสวมใส่ ตรวจสอบการยึดติดของยางยืดทั้ง 2 ด้าน และให้ลวดลึกลับสันจมูกอยู่ด้านบน
2. หันด้านสีเข้มของหน้ากากไว้ด้านนอก ให้ด้านสีขาวอยู่ด้านใน และคล้องยางยืดที่หู ทีละข้าง
3. จับลวดให้ลึกลับสันจมูก และกดเบาๆ ให้แนบกับสันจมูก
4. ใช้มือกดลวดที่สันจมูก และดึงขอบล่างของผ้าปิดจมูก พร้อมกับคลี่ผ้าปิดจมูกให้มาคลุมถึงปลายคาง
5. จับขอบด้านข้างของผ้าปิดจมูก ให้ตั้งทั้ง 2 ด้าน
6. ปรับให้กระชับ และให้เข้ารูปพอดีกับใบหน้า

ข้อควรระวัง

1. ควรเปลี่ยนหน้ากาก 1 ชิ้น ทุก 4 ชั่วโมง เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย กันกลิ่น กันฝุ่นละออง หรือละออง ของเหลว จากการไอ หรือจาม
2. หน้ากากชนิดนี้เป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง ห้ามนำไปซักและนำกลับมาใช้ซ้ำ

| สเปคหน้ากาก | วัตถุดิบ | สี | ขนาดงานสำเร็จ |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1.ผ้าชั้นนอก / Outer layer | PP Spunbond nonwoven 20gsm/2 | สีเขียว สีฟ้า สีขาว | 9.50 cm.(-0.02cm) x 14.5 (-0.02cm) |
| 2.ผ้าชั้นกลาง / Middle layre | Meltlow nonwoven 25gsm/2 | สีขาว | 9.50 cm.(-0.02cm) x 14.5 (-0.02cm) |
| 3.ผ้าชั้นใน / Inner layer | PP Spunbond nonwoven 30gsm/2 | สีขาว | 9.50 cm.(-0.02cm) x 14.5 (-0.02cm) |
| 4.ลวดลึกลับสันจมูก | ลวดท่ PVC | สีขาว | 0.3 cm.x 9 cm. (+/- 1 cm.) |
| 5.ยางยืดกลม | Spundex Latex Free | สีขาว | 03 cm. 14 cm.x2 Pcs.(+/- 0.50cm.) |

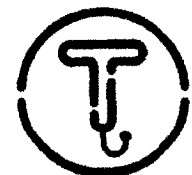

TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ท็อป เมดิคอล จำกัด






TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ท็อป เมดิคอล จำกัด

188 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

TOPMEDICAL.TH@GMAIL.COM

053-711965 , 064-0974083

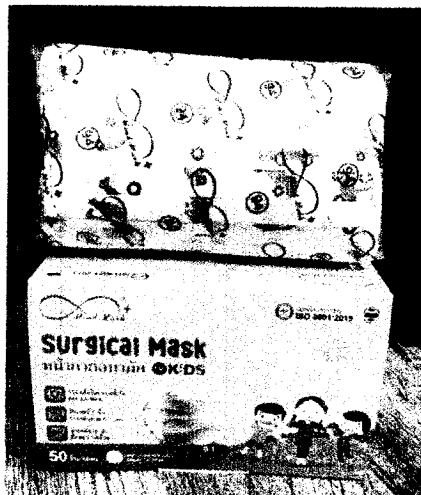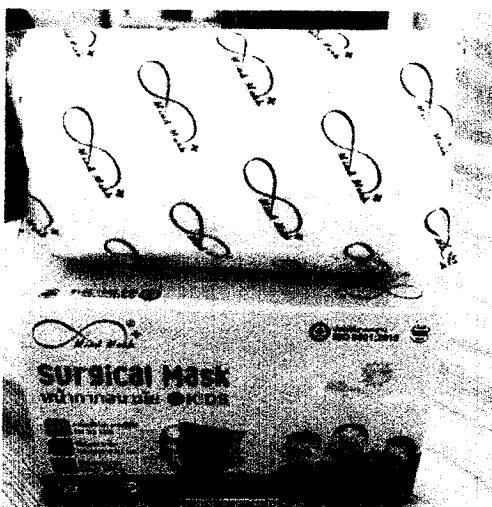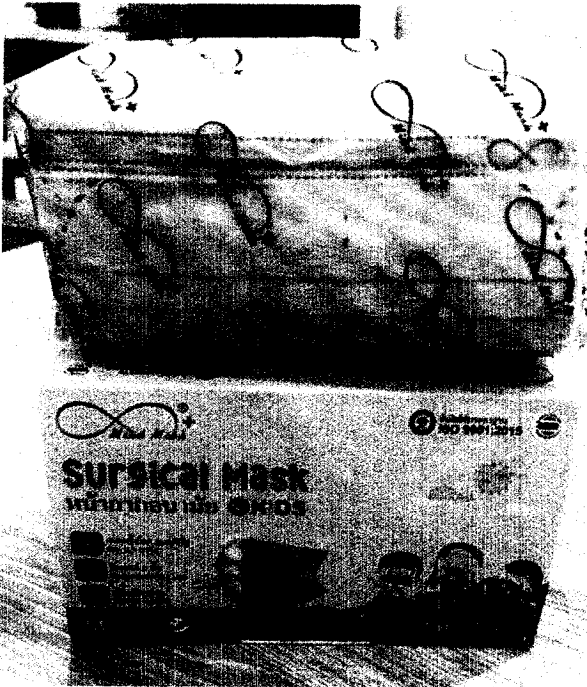

TOP MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท ท็อป เมดิคอล จำกัด